



De **7** belangrijkste stappen...

VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN FOETALE (HOOFDHUID) BLOEDMONSTERS

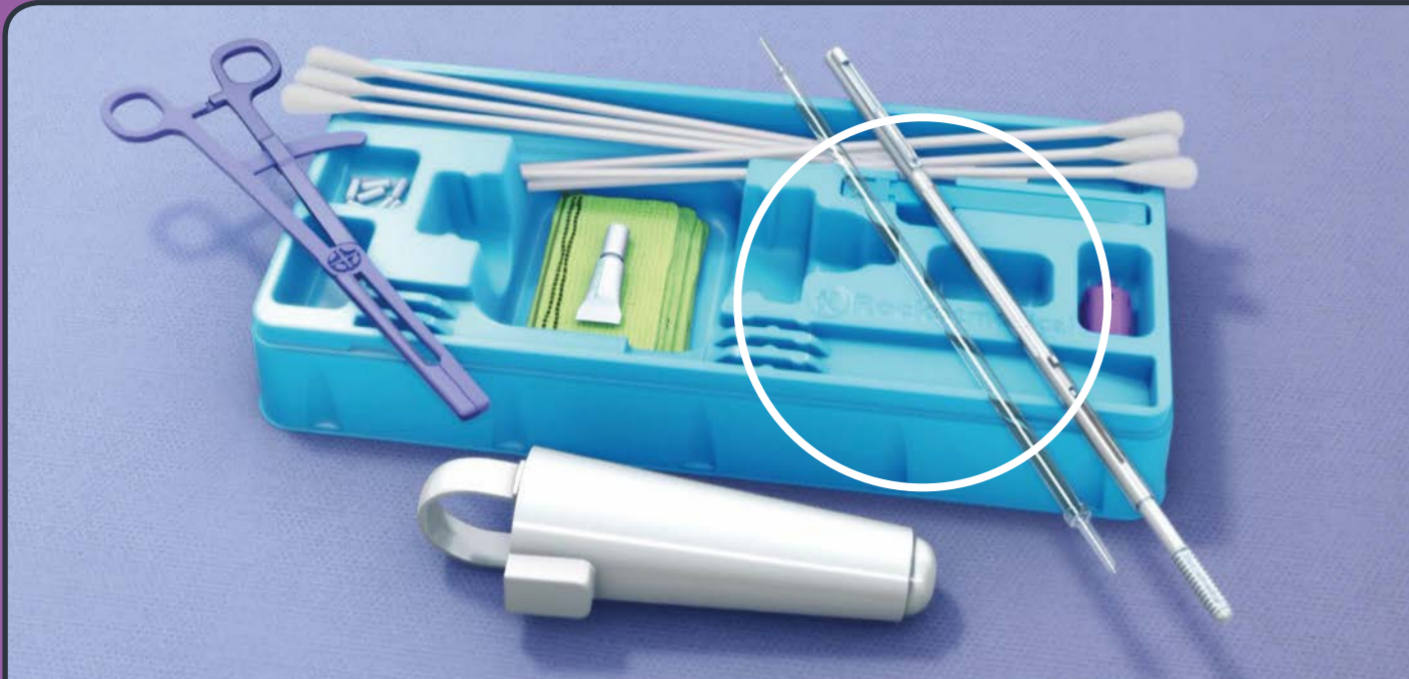

1

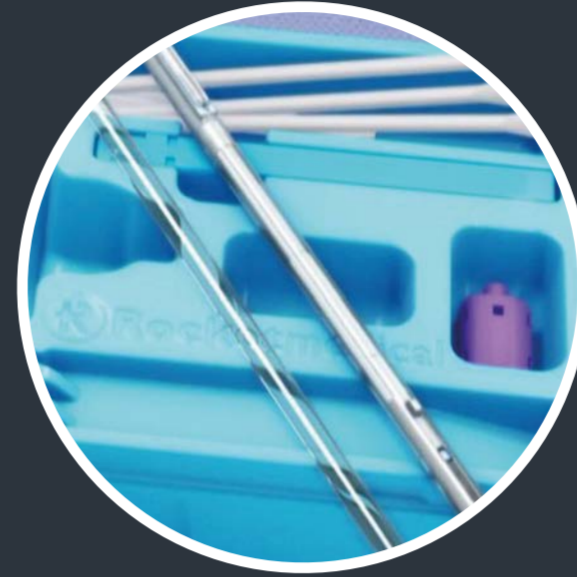

Gebruik alleen gehepariniseerde capillaire buisjes uit de kit




2

Bring een DUNNE laag vaseline aan. GEBRUIK EEN DROOG WATTENSTAAFJE OM HET OVERSCHOT TE VERWIJDEREN



3

WACHT OP EEN GOEDE BLOEDDRUPPEL

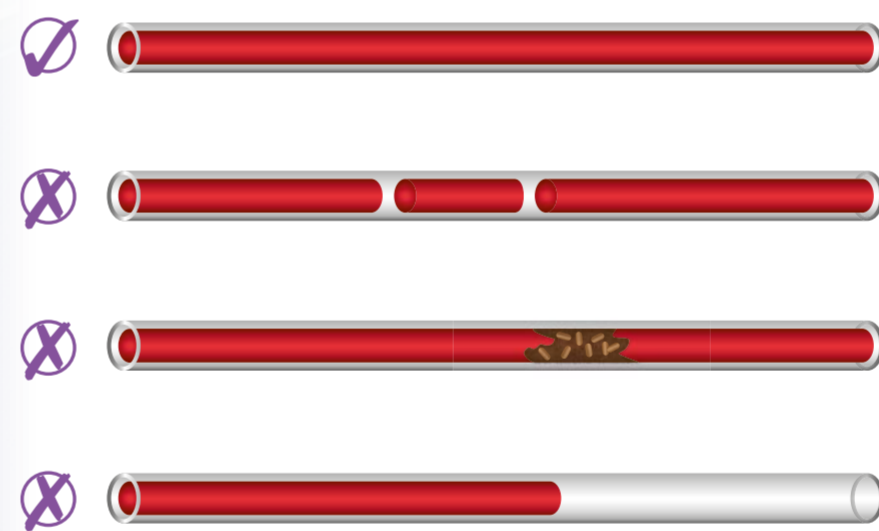

4


VUL HET BUISJE ALTIJD VOLLEDIG

Voorkom luchtballen, bloedklonters en onvolledig gevulde buisjes



5

Zet ALTIJD de schone zijde in het onderzoekapparaat

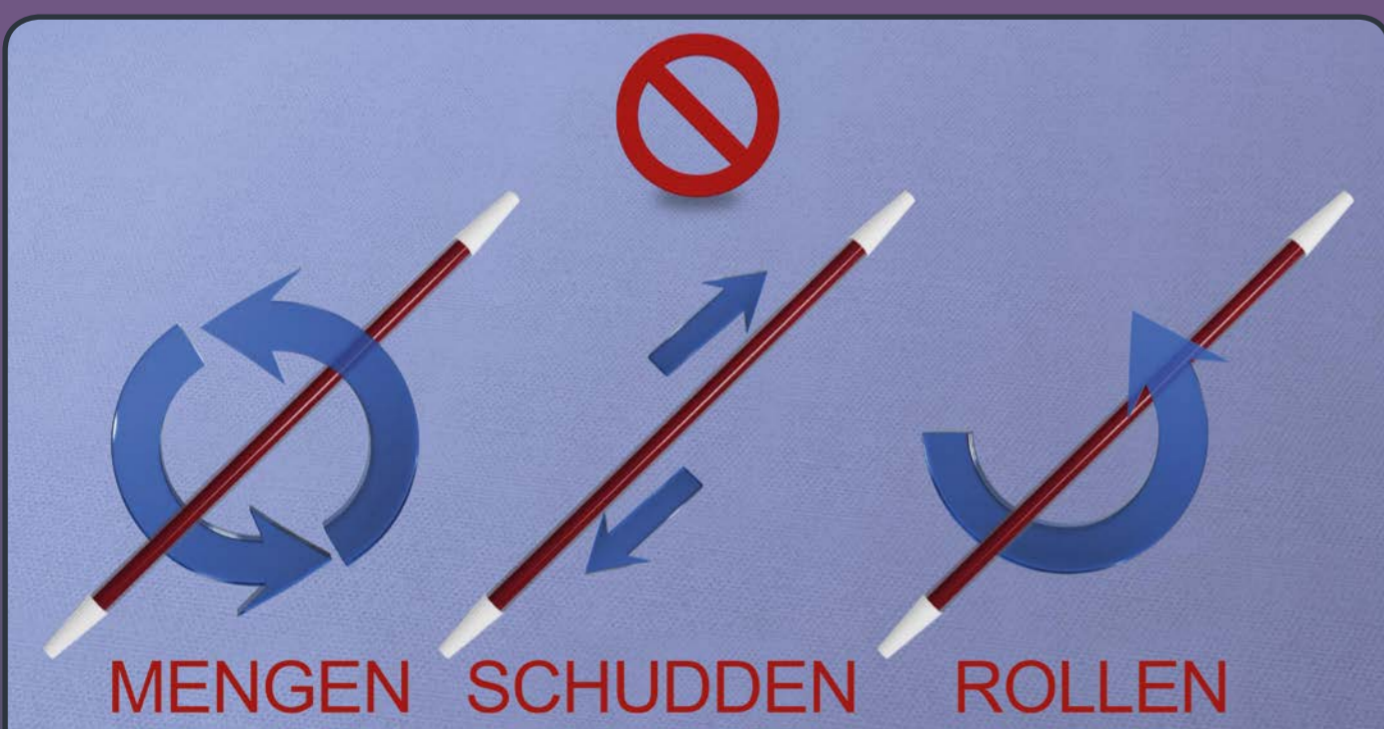

6

PROBEER het gevulde monsterbuisje NIET TE MENGEN, SCHUDDEN OF ROLLEN



Monsterbuisjes moeten niet bevatten

Luchtballen
Bloedklonters
Of onvolledig gevuld zijn

7

Analyseer slechte kwaliteit bloedmonsters NIET

Ga voor meer informatie naar de NVOG Richtlijn nr. 54 Intrapartum foetale bewaking à terme

Bekijk de trainingsvideo op onze website: nl.rocketmedical.com