


7 Hauptschritte....

UM DIE QUALITÄT DER FETALBLUTENTNAHME ZU VERBESSERN



1

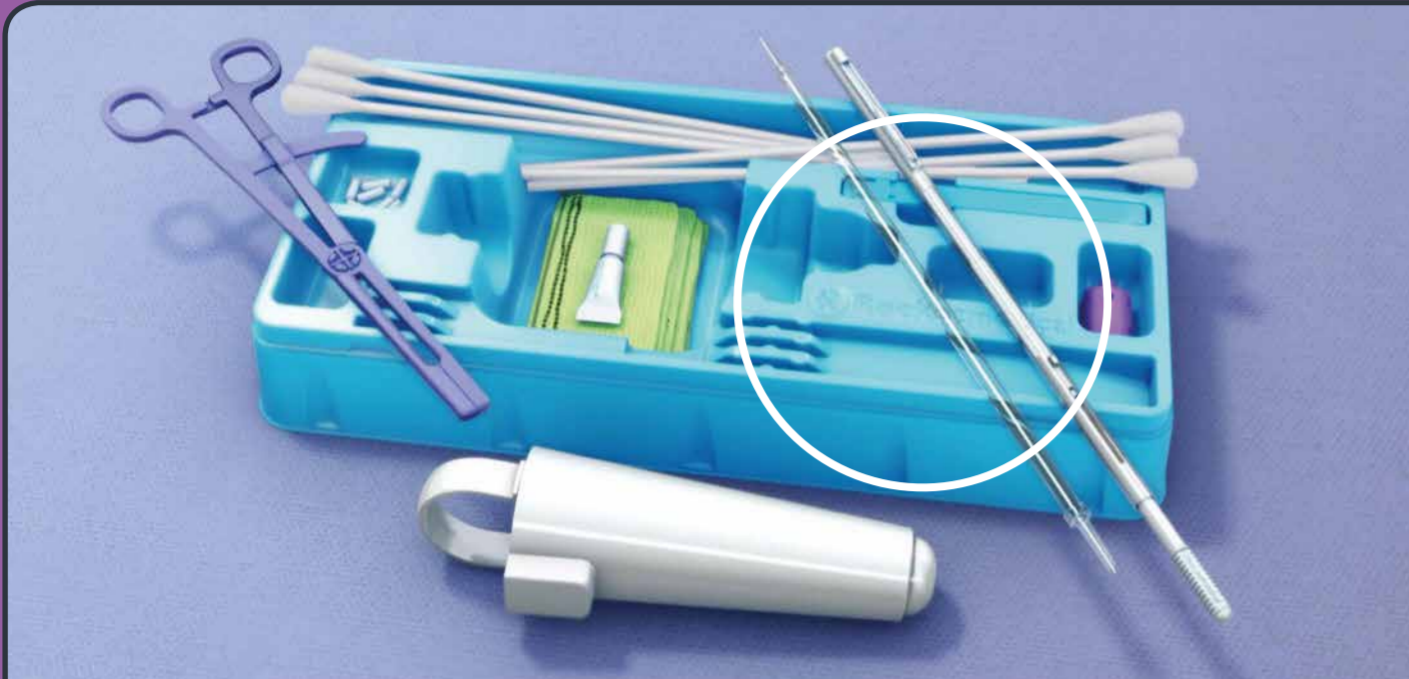


Verwenden Sie **AUSSCHLIEßLICH** die sich im Set befindlichen heparinisierten Kapillarröhrchen!



2

Tragen Sie eine **DÜNNE** Schicht Paraffin-Gel auf. **VERWENDEN SIE EIN ZWEITES, TROCKENES WATTSTÄBCHEN, UM JEDLICHEN ÜBERSCHUSS ZU ENTFERNEN!**

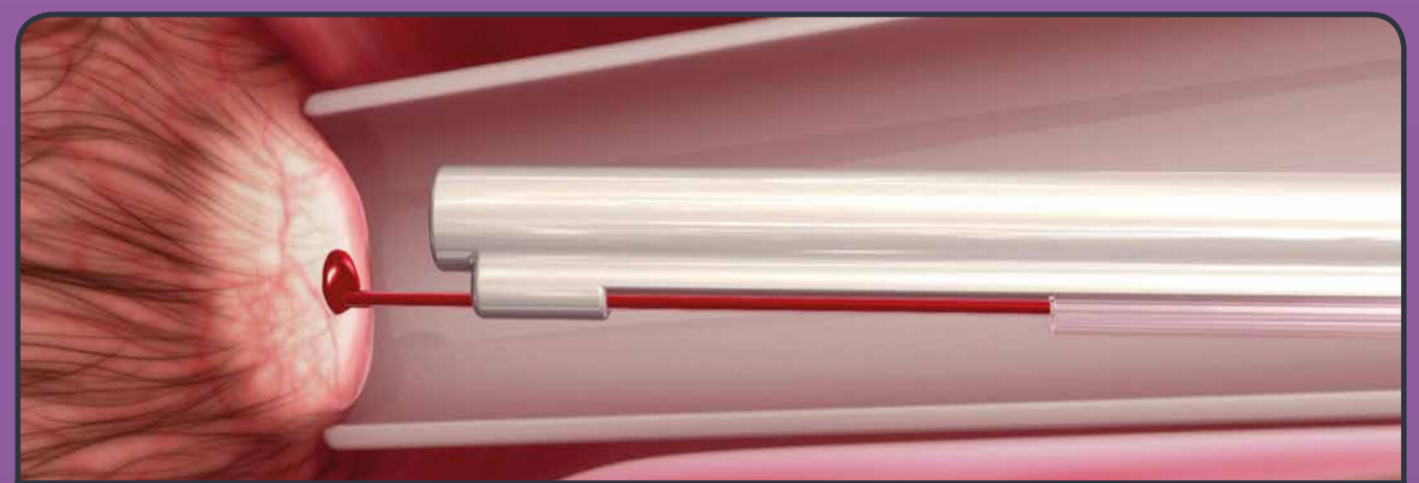

3

WARTEN SIE STETS AUF EINEN TROPFEN VON GEEIGNETER GRÖßE!



4


BEFÜLLEN SIE DAS KAPILLARRÖHRCHEN STETS VOLLSTÄNDIG!

Vermeiden Sie Proben, welche Luftbläschen bzw. Blutpfropfen enthalten oder unvollständig gefüllt sind.



5

Führen Sie **IMMER** das **SAUBERE** Ende in den Analysator ein!

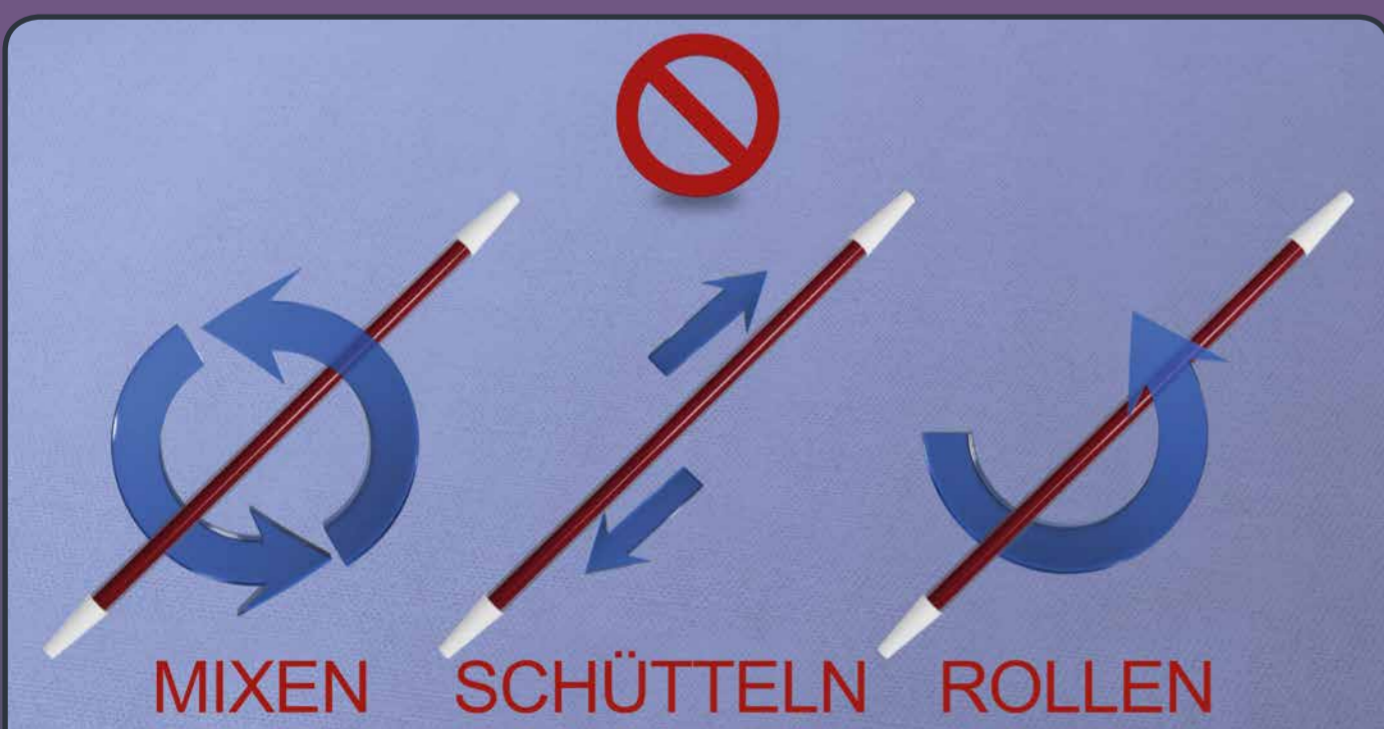

6

VERMEIDEN Sie ein **MIXEN, SCHÜTTELN** und **ROLLEN** der Blutprobe!



7

Versuchen Sie **NIEMALS** schlechte Blutproben zu analysieren!

Für Informationen und Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 0800-8599446 oder Deutschland@rocketmedical zur Verfügung.

Schauen Sie sich unser Trainingsvideo auf unserer Homepage an: rocketmedical.com